

フェイスシールド [Reha-Ribbon®シールド]

【医療・介護タイプとスタンダードタイプの比較表】

	仕様	価格	特徴	使用上の注意	推奨する活用例
医療・介護 タイプ 	〔基礎部分〕 ・プラスチック素材 〔シールド部分〕 ・PET素材 《交換方法》 差し込み	1セット (基礎部分1組 シールド5枚) 1,000円 (税別・送料別)	①柔軟性のあるプラスチック素材を使用し、顔との密着度を上げ、安全性を向上 ②外から飛沫等がシールド内部に侵入する部分を極力少なくした設計 ③シールド部分は着脱可能となっており、取り換え可能 ④使用しない場合にはシート状であり、保管しやすい	飛沫等の侵入を極力防ぐ、密着度の高い構造のため、 ①密着度が強く、長時間使用には不向き ②眼鏡使用時にはシールドとの接触有り ③シールドが曇りやすい ※コロナウィルス等の感染者や感染の疑いがある方に対する医療行為や介護使用時には、シールドを取り換えてください	①コロナウィルスやインフルエンザ等の感染者や感染の疑いがある方に対する、医療行為や介護にあたる場合 (短時間での使用時) ②緊急時の保存用
スタンダード タイプ 	〔基礎部分〕 ・スポンジ ・マジックテープ 〔シールド部分〕 ・PET素材 《交換方法》 マジックテープ	1セット (基礎部分1組 シールド1枚) 500円 (税別・送料別) ※お徳用 (基礎部分2組 シールド2枚) 900円 (税別・送料別)	①顔との接触部分にはスポンジ、ヘッドバンドにはマジックテープを使用し、快適性を向上 ②ヘッドバンドの長さ調整が可能 ②シールドが曇りにくく、長時間の使用を可能にした設計 ③シールドは着脱可能となっており、拭き取り洗浄がしやすい ④マジックテープで着脱が簡単 ⑤使用しない場合にはシート状であり、保管しやすい	快適性向上と長時間使用を優先した構造のため、 ①密閉度が低く、コロナウィルス等の感染者や感染の疑いがある方に対する医療行為や介護の使用には不向き ②ヘッドバンド及びシールド部分の着脱にマジックテープを使用しているため、激しい取り扱いは厳禁 ※汚れが目立ってきた場合には、シールドをヘアバンドから外し、拭き取り洗浄を行ってください	①対面での対応やコミュニケーションを図る場合 ②会議等に出席する場合 ③外出時など不特定多数の方と接触する可能性が高い場合 ④緊急時の保存用

